

# CROWN DOWN

## WEARPROOF SURGICAL KIT

### MANUAL DEL USUARIO

#### Indicaciones

El KIT CROWN DOWN está diseñado para realizar osteotomías de implantes dentales.

#### Precauciones generales

El uso del KIT CROWN DOWN implica un procedimiento complejo y especializado, y está dirigido a profesionales con formación en odontología.

#### Esterilización

Esterilizar en autoclave a vapor a 136 °C durante 20 minutos.

#### Incluye

Fresas: Fresa de inicio de 60°, # 20, # 30, # 35, # 40, # 45, # 50, # 55, # 60;  
topes: # 1 y # 2 (diámetro exterior = 5,5 mm).

#### Instrucciones:

**¡La irrigación con solución salina está contraindicada!**


RPM recomendadas: 200—300

1. Determine el diámetro y la longitud del implante según el caso clínico.
2. Seleccione las dos fresas correspondientes de la tabla de fresado.

Utilice la fresa de inicio de 60° para crear la muesca central. (opcional)

3. Cambie a la fresa # 1 para el hueso cortical.\*

\*Confíe en la percepción clínica; detenga la perforación cuando la resistencia disminuya significativamente.

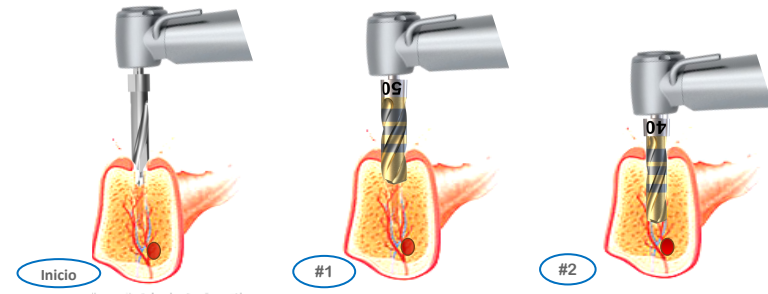

BIO-LINE DRILLING CHART						
IMPLANT DIAMETER IN mm.	3.0	3.3	3.75	4.2	5.0	5.5
DRILL #1	#30	#35	#40	#45	#50	#60
DRILL #2		#20	#30	#35	#40	#45

## CÓDIGO DE MARCADO DE PROFUNDIDAD ERGONÓMICO

