

CROWN▷DOWN

WEARPROOF SURGICAL KIT

MANUAL DEL USUARIO

Indicaciones

El KIT CROWN DOWN está diseñado para realizar osteotomías de implantes dentales.

Precauciones generales

El uso del KIT CROWN DOWN implica un procedimiento complejo y especializado, y está dirigido a profesionales con formación en odontología.

Esterilización

Esterilizar en autoclave a vapor a 136 °C durante 20 minutos.

Incluye

Fresas: Fresa de inicio de 60°, # 20, # 30, # 35, # 40, # 45, # 50, # 55, # 60; topos: # 1 y # 2 (diámetro exterior = 5,5 mm).

Instrucciones:

¡La irrigación con solución salina está contraindicada!

RPM recomendadas: 200—300

1. Determine el diámetro y la longitud del implante según el caso clínico.
 2. Seleccione las dos fresas correspondientes de la tabla de fresado.
- Utilice la fresa de inicio de 60° para crear la muesca central. (opcional)

3. Cambie a la fresa # 1 para el hueso cortical.*

*Confíe en la percepción clínica; detenga la perforación cuando la resistencia disminuya significativamente.

4. Cambie a la fresa # 2 y complete la osteotomía hasta la profundidad final planificada.

**Durante la perforación, se pueden recolectar partículas óseas para injerto óseo autógeno.

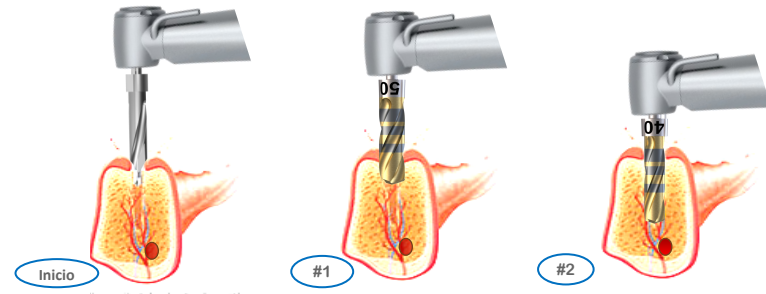


TABLA DE FRESADO						
IMPLANT DIAMETER IN mm.	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5
DRILL #1	#30	#35	#40	#45	#50	#55
DRILL #2		#20	#30	#35	#40	#45

CÓDIGO DE MARCADO DE PROFUNDIDAD ERGONÓMICO

